

Gebrauchsanweisung

Duschhocker drehbar (360°)
Badmöbel für den Nassbereich

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch.



Technische Daten

- Durchmesser Sitzfläche: 30 cm
- Durchmesser Sitzplatte: 33 cm
- Höhenverstellbar: 36–51 cm (7-fach verstellbar)
- 360° drehbare Sitzfläche
- Leicht und kompakt
- Gewicht: ca. 2 kg

Produktbestandteile



Montageanleitung



1. Lieferumfang prüfen

Alle Teile aus der Verpackung entnehmen und auf Vollständigkeit prüfen.



2. Sitzrahmen montieren

- Sitzrahmen an der Sitzplatte befestigen
- Zuerst die mittlere Schraube einsetzen
- Danach die vier äußeren Schrauben festziehen
- Abstandshalter zuerst einsetzen, anschließend verschrauben



3. Beine einsetzen

- Federknopf am Bein eindrücken
- Bein in die vorgesehene Öffnung stecken
- Auf korrektes Einrasten achten
- Alle vier Beine auf dieselbe Höhenstufe einstellen



4. Montage abgeschlossen

Höhenverstellung

- Federknopf eindrücken
- Gewünschte Höhe einstellen
- Sicherstellen, dass alle Beine gleich eingestellt sind

Pflege

- Mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden
- Schraubverbindungen regelmäßig kontrollieren

Sicherheitshinweise

- Nur auf ebenem, rutschfestem Untergrund verwenden
- Vor jeder Nutzung Stabilität prüfen
- Hocker mittig in der Dusche platzieren
- Nicht als Steighilfe oder Leiter verwenden
- Nicht zweckentfremden